

ODSTRAŇOVAČ UŠNÍHO MAZU



W60

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Použití

Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny.

1. Instalace a demontáž koncovky

Nasadte koncovku na rameno. Držte koncovku a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček.



2. Nabíjení

K nabíjení zařízení použijte nabíjecí USB-C kabel (kabel je součástí balení). Během nabíjení, červená LED ("Normal") svítí. Po plném nabití, LED bude svítit modře.

Ve chvíli, kdy má zařízení nízký stav baterie, červená LED ("Normal") bude blikat.




3. Nastavení režimu

Zařízení disponuje 4 režimy: Normální, jemný, pulzní a silný.



4. Vyjmutí nádoby na vodu

Otáčejte s nádobou ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji od hlavní jednotky zařízení.

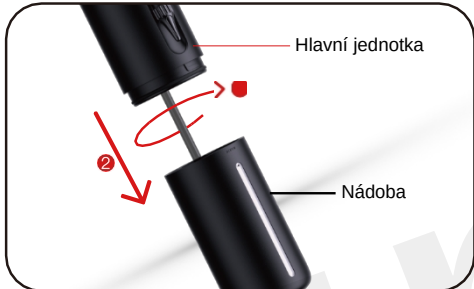

5. Čištění nádoby na vodu

1. Vyjměte nádobu z těla zařízení. Poté ji z vnější i vnitřní strany řádně umyjte teplou vodou a saponátem

Údržba

1. Vyjměte nádobu ze zařízení, vylijte zbylou vodu a ponechte nádobu vyschnout.

2. Zapněte zařízení a vystíkejte z ramena a koncovky zbytek vody.

3. Vyjměte ušní koncovku a vyhodte ji.

4. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem. K čištění nepoužívejte agresivní a korozivní kapaliny.

Použití

Před prvním použitím, si pečlivě přečtěte uvedený manuál.

1. Před prvním použitím, umyjte důkladně nádobu na vodu saponátem a poté horkou vodou.
2. Po použití, vypláchněte nádobu horkou vodou a saponátem.
3. Nádobu otřete suchým hadříkem.
4. Zařízení plně nabojte přiloženým USB-C kabelem.
5. Do umyté nádoby poté nalijte vodu o teplotě cca 36 °C (98 °F), viz Obr. 1.
6. Zvedněte rameno (Obr. 2).
7. Nastavte požadovaný tlak (vyberte režim, nejprve začněte Normálním režimem).
8. Poté opatrně umístěte koncovku do ušního kanálu (Obr. 3).
9. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout/sprejování vody.
10. Pod ucho umístěte ručník, nebo nádobu a zachyťte vytékající vodu z ucha (Obr. 4).
11. Po dokončení čištění, vypněte zařízení. Vodu z nádoby vylijte, vyčistěte a osušte.

Specifikace

Název produktu	Odstraňovač ušního mazu
Název modelu	W60
Kapacita baterie	2000 mAh
Napájení	1,3 W
Vstup	Typ C DC 5V/1A
Doba nabíjení	3 hodiny
Nádoba na vodu	250 ml
Hmotnost	310 g



Řešení potíží

1. Pokud nejde zařízení zapnout, ujistěte se, že je řádně nabit.
2. Pokud je pracovní doba čističe uší po úplném nabití krátká, nabijte jej a používejte při teplotě prostředí mezi 15-35 °C. Případně zařízení nabíjejte delší dobu. Doba nabíjení je nedostatečná.
3. Pokud LED světla během nabíjení nesvítí, zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí zdroj.
4. Pokud je tlak vody, příliš nízký, vyměňte ušní koncovku za novou. Případně vyzkoušejte silnější režim stříkání vody.

Důležité bezpečnostní upozornění!
Dodržujte pokyny v manuálu. V případě potřeby kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Varování

1. Pokud trpíte onemocněním uší, kontaktujte před použitím zařízení svého ošetřujícího lékaře.
2. Zařízení nepoužívejte v případě, že trpíte Tympanostomickými trubičkami nebo jste prodělali operaci uší, máte podezření na perforaci bubínku a nebo infekci ucha. Poradte se o používání s ORL lékařem.
3. K odstranění mazu používejte pozte teplou vodu, cca teplotu těla. Nikdy nepoužívejte horkou nebo studenou vodu.
4. Ideálně použijte fyziologickou vodu nebo sterilní vodu.
5. Pokud dojde k podráždění, krvácení nebo k poranění zvukovodu, přestaňte zařízení ihned používat.
6. Zařízení vydává zvuk a tlak. Pokud ucítíte podráždění nebo bolest, kontaktujte svého lékaře.
7. Zařízení disponuje krytím IPX5 a lze ho použít také ve sprše.
8. Zařízení nepoužívejte u dětí mladších 15 let.
9. zařízení není hračka. Skladujte mimo dosah dětí. Jinak hrozí riziko poranění. Pokud bude zařízení poškozeno, ihned ho přestaňte používat.

Obsah balení



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz