

OTOSKOP PRO KONTROLU A ČISTĚNÍ UCHA TESLONG SMART OTOSCOPE WIFI

Model: SA39W



Uživatelský manuál

Obecné informace

Pozorně si přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Odpovědnost za škody způsobené při nedodržení manuálu nenese výrobce ani dodavatel.

Údržba

K čištění použijte vlhký nebo lehce namočený hadřík v saponátu. Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, prosím plně ho nabijte.

Přenos/přesun

Pokud bude potřeba zařízení přenášet/převážet, skladujte ho prosím ve vhodné krabici. Jinak hrozí riziko poškození přístroje.

Likvidace

Elektrické zařízení likvidujte podle platných norem.

Popis



1 Kamera/LED: LED se rozsvítí ve chvíli, když je zařízení zapnuto.

2 Indikátor stavu baterie: Zařízení nabijte ve chvíli, kdy LED indikátor bude ukazovat nejnižší hodnotu.

3 Tlačítko zapnout/vypnout: Dlouze stiskněte tlačítko a zapněte/vypněte zařízení.

4 Mikro USB nabíjecí port: 5V/1A nebo 5V/2A nabíjecí port.

Aplikace

1. V internetovém obchodě Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS) vyhledejte aplikaci Smart Endoscope a nainstalujte ji. Odkaz na stažení aplikace: <https://gto.so/smart-endoscope>.

2. Vyberte kukátko nebo ušní nástavec a nainstalujte ho na zařízení.

3. Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení zapněte.



LED
indikátor se
při zapnutí
zařízení
rozsvítí

4. V mobilním telefonu otevřete wifi nastavení. Spojte telefon se zařízením „Smart Otoscope“.

5. Poté otevřete aplikaci. Aplikaci využijte ke sledování vnitřního prostředí ucha v reálném čase.



Popis

Otoskop je snadno přenositelné, do ruky padnoucí zařízení schopné pořídit video s krátkou ohniskovou vzdáleností. Je kompatibilní s iPhonem, iPadem a Androidem. Vysoké rozlišení kamery poskytuje video o velmi dobré kvalitě. 6 LED světel napomáhá k lepšímu osvětlení a lepší vizualizaci zorného pole.

Bezpečnost

1. Vyberte vhodné kukátko a nasadte ho na hlavu zařízení. Kukátko nasadte správně, jinak hrozí riziko poranění během používání.
2. Před použitím očistěte tělo zařízení 75 % alkoholem. Nástavce desinfikujte horkou párou při teplotě 273 F 10 min.
3. Zařízení není určeno pro uživatele s mentálními, fyzickými nebo motorickými potížemi.

4. Endoskop slouží k odstranění ušního mazu a k prozkoumání stavu bubínku. Nepoužívejte zařízení k jinému účelu. Výrobce/prodejce neručí/nenese zodpovědnost za vniklé škody nebo újmy na zdraví.
5. Při vkládání nástavce do ucha, buďte opatrní (vkládejte pomalu a opatrně). Jinak hrozí riziko poškození sluchu. Během používání, sedněte v klidu. Nepohybujte prudce hlavou. Nezavádějte endoskop ve zvukovodu příliš daleko. Zařízení není náhrada za odborného lékaře. Při bolestech ucha, problémech se sluchem nebo jiných obtížích ihned vyhledejte lékařskou péči/lékaře.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení není hračka.
7. Endoskop smí používat pouze dospělé osoby, které si důkladně přečetli uvedený manuál. Zamezte během používání kontaktu s jinou osobou.
8. Endoskop používejte pouze při pokojové teplotě. Nevystavujte/nepoužívejte zařízení extrémním teplotám, prašnému prostředí a vysoké vlhkosti. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
9. Pokud bude zařízení vykazovat nějaké abnormality/přehřívání, přestaňte zařízení ihned používat. Jinak hrozí riziko poranění. Kontaktujte prosím servisní pracoviště/prodejce.
10. Zařízení nevkládějte do vody, ani jiných korozivních kapalin. Otírejte ho pouze suchým, případně vlhkým hadříkem (utřete do sucha).
11. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Nevhazujte zařízení do ohně. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo riziko požáru.

Specifikace

Síť: IEEE 802.11 b/g/n

Anténa: IPEX zabudovaná anténa

Pracovní frekvence: 2.4 GHz

Rychlost dat: 802.11a/b/g/n až do 150 Mbps

Průměr kamery: 3.9 mm

Pozorovací úhel: 70°

Hloubka pole: 10 – 30 mm

Zdroj světla kamery: 6 LED

Vstup: 5V/1A

Typ baterie: 800 mAh lithiová baterie

Životnost baterie: 3 h

Upozornění:

Pokud se obraz během používání sekne, restartujte aplikaci.

Pokud nepůjde zařízení zapnout nebo vypnout, zřejmě je slabá baterie, zařízení nabijte.

Pro zachování kvalitního obrazu a udržení zařízení v dobrém stavu, postupujte podle uvedených kroků:

Po každém použití nástavce očistěte. Před každým použitím také. Tím zajistíte, že se na objektivu kamery nebude usazovat ušní maz.

Ohniskovou vzdálenost zachovejte 1 palec, tím získáte kvalitní obraz.

Pokud zastrčíte otoskop příliš daleko, hrozí riziko rozmazání obrazu

Ušní kanál není rovný, vkládejte zařízení velice pomalu a opatrně.

Napájení

Před vložením zařízení do zásuvky, ujistěte se, že máte vhodné napětí.

Použijte pouze AC adaptér. Nabíjejte zařízení v dobře větrané místnosti (na stole, na podlaze).

Adaptér může být během nabíjení teplý.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz