

JINGHAO JH-907 HALLGATÁS



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.

Értesítés

Ellenjavallatok

Ne használja a készüléket a következő helyzetekben:

1. Krónikus gennyes középfülgyulladásban (CSOM), veszületett fületresiában vagy bármilyen típusú fülfolrásban szenvedő betegek.
2. 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek.

Figyelmeztetés

A lenyelhető apró alkatrészeket (hallókészülék, fülhallgató, elemek vagy más levehető alkatrészek) tartsa távol a gyermekektől.

Védje a készüléket folyadékoktól, víztől és erős elektromágneses mezőknek való kitettségtől. Védje a berendezést a rádiófrekvenciás terektől. Ellenkező esetben fennáll a berendezés és a hangerősítő károsodásának veszélye.

Vegye ki a készüléket, ha röntgen-, MRI- vagy CT-vizsgálatra készül.

Ha a tartozék nem távolítható el a hallójáratból, azonnal keresse fel orvosát.

Értesítés

Ne használjon túl nagy hangerőt hosszú ideig. Ellenkező esetben fennáll a fűlsérülés veszélye.

Ha fájdalmat vagy bármilyen kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Forduljon orvoshoz.

Tartsa tisztán a felszerelést.

Győződjön meg róla, hogy a tartozék mindig száraz, tiszta és szennyeződésektől mentes.

Védje a berendezést a leejtéstől és egyéb helytelen kezeléstől.

Védje a készüléket a magas hőmérséklettől és páratartalomtól (például ne vigye a készüléket szaunába). Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Az akkumulátorokat az országában érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően hasznosíthatja újra.

Védje a készüléket a gyermekektől. A készülék nem játék. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

Ne használja a készüléket túl hangosan. Ellenkező esetben fennáll a halláskárosodás veszélye.

Ne ossza meg a készüléket más felhasználókkal. A készüléket kizárólag személyes használatra szánjuk. Fennáll a helytelen beállítás és a másik felhasználó hallásának károsodásának veszélye.

Ha kiütés, bőrpír vagy viszketés jelentkezik. Azonnal hagyja abba a készülék használatát. A további használatához forduljon orvosához.

Védje a berendezést a nagy mágneses terektől és mágnesektől. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Ne szedje szét a berendezést, és ne babrálja meg. Forduljon szervizhez.

A berendezéseket magas hőmérséklettől és páratartalomtól védve tárolja. Védje a berendezést a közvetlen napfénytől. Tartsa a berendezést távol a magas hőmérsékletet és hőt kibocsátó tárgyaktól.

Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol fennáll a tűz- vagy robbanásveszély.

Ne használja tovább a készüléket a következő helyzetekben:

1. A külső fül veleszületett atresziája vagy a hallójárat bármely részének deformitása.
2. A siketség instabil, és a halláscsökkenés mértéke gyakran ingadozik.
3. Tartós fejfájás, szédülés, fülfájás, fülzúgás vagy egyéb, alkalmazkodásra alkalmatlan tünetek.
4. Hirtelen fellépő halláscsökkenés az elmúlt 3 hónapban; gyorsan progrediáló sükettség; egyoldali halláscsökkenés vagy más akut fülbetegség.
5. A fülből származó váladék (váladék/ürítés) és/vagy gyakori gennyesedés.
6. Központi sükettség (központi idegrendszeri) vagy nem szervi sükettség.
7. Akut külső középfülgyulladásban és tympanitisben szenvedő betegek.
8. Akut és krónikus gennyes középfülgyulladásban szenvedő betegek (a gennyes fertőzés ideje alatt).
9. Ha a felhasználók allergiásak a készülék anyagára.


Típusok és figyelmeztetések

Védje a berendezést a víztől. Ne menjen a készülékkel a medencébe. Ne használja a készüléket a zuhany alatt. Várja meg, amíg a hallójárat megszárad. Ezután használja újra a készüléket. Tartsa a fülbe illesztett tartozékot fülzsírtól mentesen. Naponta tisztítsa meg a tartozékot.

Alkalmazhatóság: 30-50 dB halláscsökkenéssel rendelkező személyek számára alkalmas.

Használaton kívül vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor körülbelül 28 napig tart.

Leírás

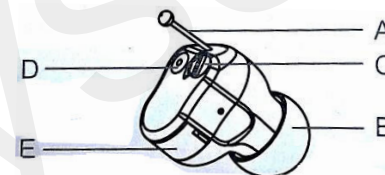

A. Húzószinór

B. A fül rögzítése

C. Hangerőszabályozás


D. Mikrofon

E. Elemtartó (ON/OFF)

A tartozék felszerelése

Helyezze be a rögzítőelemet megfelelően. Ha a tartozékot helytelenül szereli fel, elveszhet.

1. Válassza ki az egyik méretet (L, M, S).
2. Nyomja kifelé a hosszabbítás szélét.

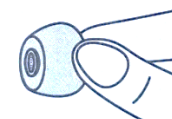


3. Fogja meg a készülék végét, és nyomja meg erősen a hosszabbítót. Győződjön meg róla, hogy a hosszabbítás szilárdan rögzítve van.



Megjegyzés: A felszerelés után állítsa be a rögzítést, és győződjön meg róla, hogy a rögzítés megfelelően rögzítve van, és nem fog leesni.


Hordás és behelyezés

1. Fogja meg a készüléket, és óvatosan helyezze a fülébe. Kövesse az ábrát.
2. Csúsztassa a testet kissé a fülkagylóba. Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően ül.

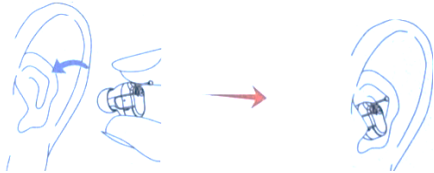

Retrieved from

1. Fogja meg a készüléket a hüvelyk- és mutatóujjával, és óvatosan vegye ki a füléből.

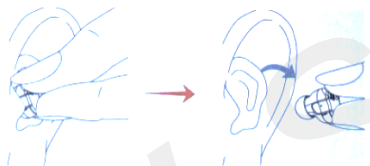

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a készülék eltávolításakor a tartozék beszorul a hallójáratba. Forduljon orvosához. Mielőtt a készüléket megfelelően rögzítené, előfordulhat, hogy csikorgó hangot ad ki, ami normális. A csikorgó hangot referenciaként lehet használni annak megállapítására, hogy a készülék rögzítve van-e. Ha a készülék nyikorgó hangot ad, ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve van-e. Ha a nyikorgó hang továbbra is fennáll, cserélje ki a rögzítést. Ha nem fogja használni a készüléket, kapcsolja ki.

Ha a készülék rendellenességeket mutat, lásd a Hibaelhárítás című részt. Alternatív megoldásként forduljon a szervizhez.

Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: helyezze az elemtartóba az elemet, majd zárja be. A készülék bekapcsol.




Kikapcsolás: nyissa ki teljesen az elemtartót, és kapcsolja ki a készüléket. A rekesz megfelelő kinyitásakor egy kattánást fog hallani. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.




Hangerő beállítások

A hangerő növeléséhez forgassa a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba. A hangerő csökkentéséhez forgassa a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba.

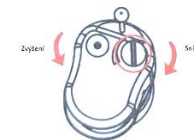

Az akkumulátor cseréje

1. Távolítsa el az új akkumulátorról a védőfóliát. Várjon 3-5 percet, majd helyezze be az akkumulátort.
2. Óvatosan nyissa ki az elemtartót. Vegye ki a régi elemet, és helyezze be az új elemet. Győződjön meg a helyes polaritásról. A pozitív polaritás felfelé mutat.

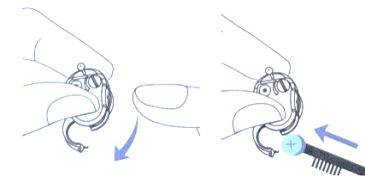

3. Óvatosan zárja be az elemtartót.

Megjegyzés: soha ne gyakoroljon túl nagy nyomást az elemtartó rekesz lezárásakor. Ellenkező esetben a készülék károsodhat. Ha a rekesz nem zárható, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve. Nyitáskor is legyen óvatos.

Az akkumulátort az országában érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően hasznosíthatja újra.

Használjon cink-levegőcellás A10 akkumulátort.

Figyelmeztetés

Tartsa az akkumulátort gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ne szerelje szét az akkumulátort, és ne babrálja meg. Ne vegye az akkumulátort a szájába.

A használat ideje és időtartama, a hang tisztasága stb. itt csak tájékoztató jellegű. Ezek a berendezés használatának módjától függnének. Túl nagy hangerő esetén fűtülő hangjelzés jelentkezhet. Csökkentse a hangerőt. Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van-e felszerelve.

Karbantartás és tisztítás

1. Napi takarítás

Tartsa a felszerelést szárazon és tisztán. A tisztításhoz használjon puha ruhát.

Védje a berendezést a magas páratartalomtól.

2. rutinszerű karbantartás

Tisztítás közben ne nyomja össze és ne manipulálja a készüléket nem megfelelő módon. Ha a készülék vízbe esik, azonnal vegye ki, és száraz ruhával szárítsa meg. Ezután forduljon szervizhez, és ellenőriztesse a készüléket.

Megjegyzés: Védje a berendezést a magas/alacsony hőmérsékleti szélsőségektől. Védje a berendezést a karcoktól és idegen tárgyaktól. A tisztításhoz száraz, puha tisztítókefe is használható. Használja a lyukak és a gombok tisztítására. Ne használjon folyadékokat, oldószereket vagy más maró hatású folyadékokat.

Hibaelhárítás

A probléma	Ok	Megoldás
A hang/hang nem eléggé hallható	Alacsony töltöttségű akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort
	Blokkolt mikrofon vagy vevőegység	Tisztítsa meg a mikrofont és a vevőt
	A hallhatóság változó	Kapcsolatfelvétel az orvossal
	Szennyeződések felhalmozódása	Tisztítsa meg a mikrofont és a vevőt egy kefével
Következetlen teljesítmény	Alacsony töltöttségű akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort
	Blokkolt mikrofon vagy vevőegység	Tisztítsa meg a mikrofont és a vevőt
Tisztázatlan torz teljesítmény	Alacsony töltöttségű akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort
	Blokkolt mikrofon	Tisztítsa meg a mikrofont és a vevőt
Nem kapcsolható be	Alacsony töltöttségű akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort
	Blokkolt mikrofon	Tisztítsa meg a mikrofont és a vevőt

Típusok

Időbe telik, amíg az agy megszokja a készüléket. Használat közben maradjon az interakciót végző személy közelében. Üljön közvetlenül szemben a személlyel. Keresse meg a legjobb helyet a kommunikációhoz. Korlátozza az akadályokat. Kerülje a zavaró háttérzajokat. A készülék kicsi, és első pillantásra nem biztos, hogy nyilvánvaló, hogy Ön viseli a készüléket. Legyen türelmes, időbe telik, amíg megszokja az eszközt.

Műszaki adatok

Modell: JH-907

OSLP kimenet₉₀ Max: $\leq 126 \text{ db}+3\text{db}$

FOG50 Maximális működés: $\leq 35 \text{ db}+5\text{db}$

EQ bemeneti hang: $\leq 50 \text{ db}$

Teljes harmonikus torzítás: $\leq 30\%$

Frekvenciatartomány (nem szűkebb, mint): 300 - 3000 Hz

Működési áram: $\leq 10 \text{ mA}$

Névleges feszültség: DC 1,5 V

Akkumulátor típusa: A10

Üzemi hőmérséklet/páratartalom: $-10-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $\geq 30\% \text{ RH}$; $\leq 75\% \text{ RH}$

Tárolási idő:/Páratartalom: $-10-55 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $\geq 10\% \text{ RH}$

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz