
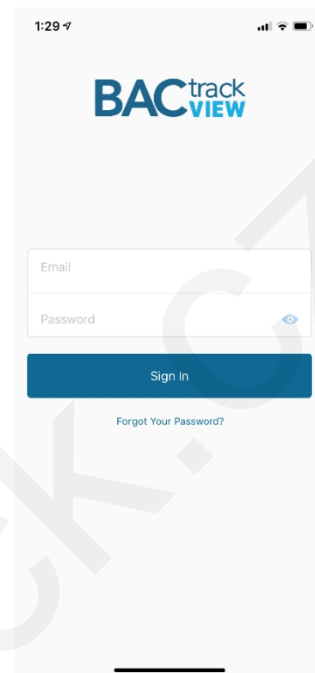
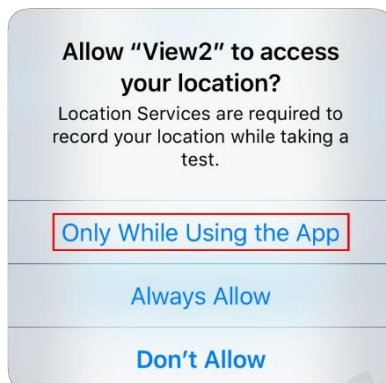


BACtrack View Stručný návod k použití | Monitor


1. **PŘIHLÁŠENÍ** - Po [stažení aplikace BACtrack View 2](#) z obchodu Apple iTunes App Store otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí stejné e-mailové adresy a hesla, které jste si vytvořili při registraci do služby.

Při prvním otevření aplikace budete vyzváni k udělení přístupu k fotoaparátu a poloze. To je nutné pro používání aplikace.

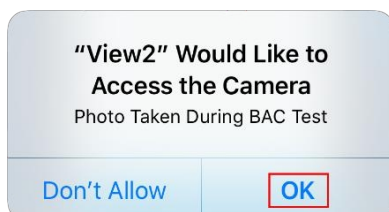

Pokud jste zapomněli své heslo, klikněte na odkaz "Zapomněli jste heslo?" a heslo se zobrazí. vám bude zaslán e-mail s obnovením.




2. (VOLITELNÉ) **PŘIDAT TESTERA** - Pokud jste během registrace nepozvali ke svému účtu testera, můžete tak učinit klepnutím na ikonu "Kontakty" v levém dolním rohu aplikace. Zadejte jejich e-mailovou adresu a bude jim zaslána pozvánka k připojení k vašemu účtu spolu s pokyny k nastavení účtu. Po přijetí pozvánky obdržíte e-mail.

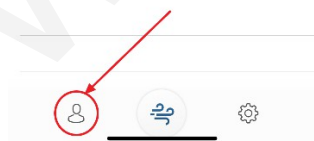

3. **NASTAVENÍ ROZVRHU TESTOVÁNÍ** - Chcete-li nastavit nový plán testování, klepněte na ikonu "+" na pravé straně.

obrazovky. Zde budete moci vybrat Tester a poté:


- Nastavení dne zahájení plánu a časového rámce
- Nastavení, zda a jak často se má plán opakovat
- Nastavení, zda mají být časy testů náhodné, nebo ne
- Nastavit, kolik náhodných testů má být naplánováno během časového rámce testování.

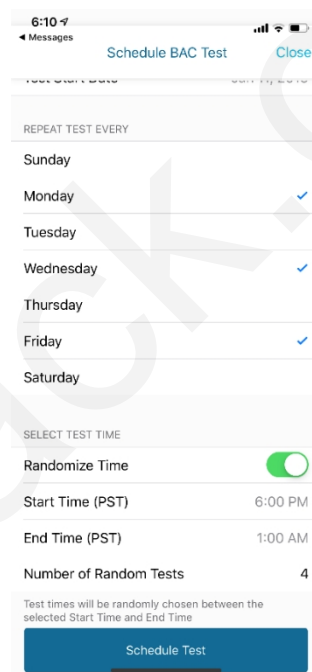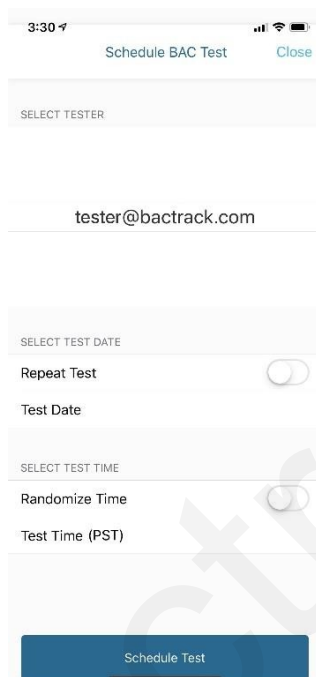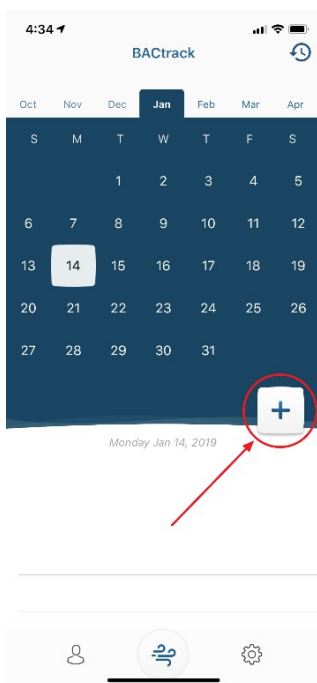


Po výběru plánu testování se klepnutím na tlačítko "Naplánovat test" vraťte na domovskou obrazovku. Zde můžete vidět všechny budoucí dny testování, které jsou označeny šedou tečkou pod datem.

4. **TESTOVÁNÍ** - Když nastane čas, aby tester podstoupil test BAC, obdrží textovou zprávu z aplikace BACtrack View na svém zařízení se systémem iOS. Měl by kliknout na odkaz ve zprávě, aby otevřel aplikaci BACtrack View a zahájil test:

1. Ujistěte se, že je v zařízení se systémem iOS povolena funkce Bluetooth, a poté zapněte zařízení BACtrack stisknutím stříbrného tlačítka na 1-2 sekundy, dokud se nerozsvítí modré kontrolky.
2. Aplikace se pak automaticky propojí s přístrojem BACtrack. Po připojení se zobrazí obrazovka "příprava zařízení", následované slovy "zhluboka se nadechněte".
3. Po výzvě foukejte do přístroje BACtrack po dobu 5 sekund a držte přitom zařízení iOS ve výšce očí. Nemusí foukat co nejsilněji, ale musí pevně a soustavně vydechovat po dobu 5 sekund v kuse, dokud neuslyší v zařízení cvaknutí.
4. Bude vám zasláno oznámení o dokončení testu. Výsledek testu, datum, čas, místo a obrázek se zobrazí v části Výsledky testu v kalendáři.

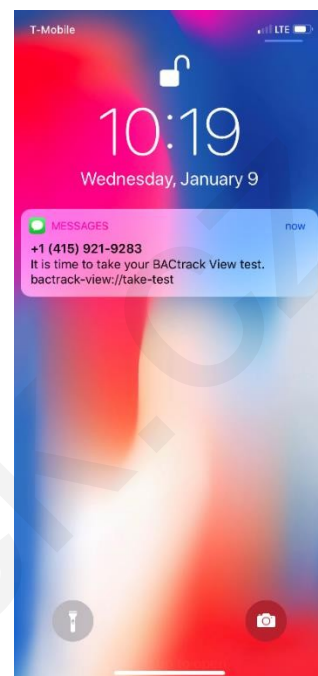

POZNÁMKA: Pokud se zobrazí chyba, vypněte a znovu zapněte přístroj BACtrack a teprve poté znovu spusťte proces testování.

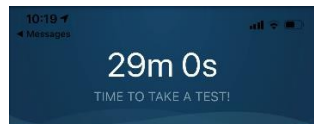


Turn on BACtrack




If you are using the C6 or C8, please make sure your device is in "App Mode".

Cancel Test

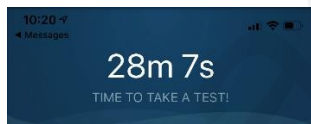

Preparing the device

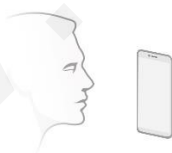

Hold your device at eye level

Cancel Test



Blow for 5 seconds



Keep blowing...



5. (VOLITELNÉ) **EXPORTOVAT ZPRÁVY VE FORMÁTU PDF** - V závislosti na úrovni plánu si můžete stáhnout zprávy ve formátu PDF o činnosti testera. Klepněte na ikonu "Aktivita" v pravém horním rohu. Poté klepněte na ikonu "Stáhnout" v pravém horním rohu a obdržíte e-mail s příloženou zprávou PDF.

